


TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

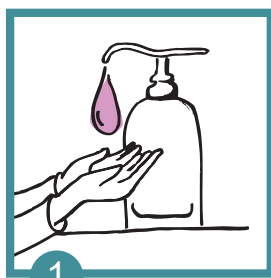


Vydezinfikuješ si ruce




Posadíš se ke stolu




Dostaneš instrukci

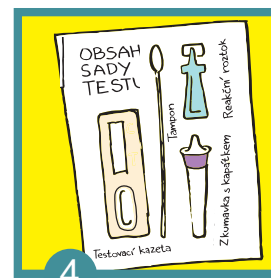


Rozbalíš si test

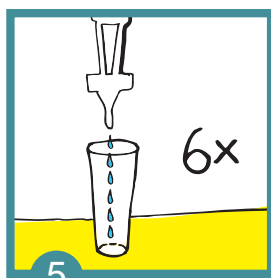

Do zkumavky nakapeš 6 kapek

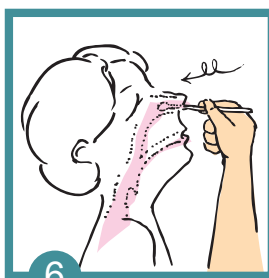


Tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce

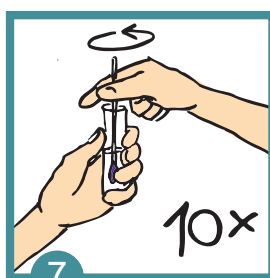

Tyčinkou 10x otočíš ve zkumavce s roztokem a necháš minutu stát




Setřeš z tyčinky kapalinu, uzavřeš zkumavku a necháš minutu stát

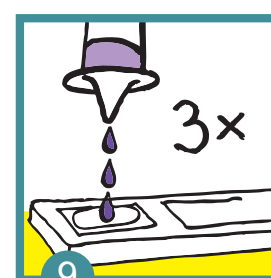


Nakapeš 3 kapky odstátého roztoku do otvoru v testovací kazetě




Stopujeme 15 minut

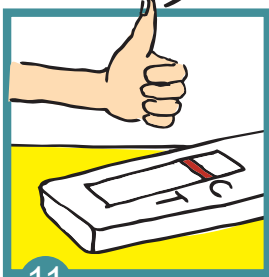

A máš tu výsledek

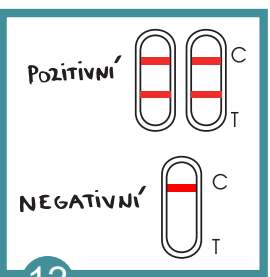

Výsledek testu se objeví v okénku testovací kazety

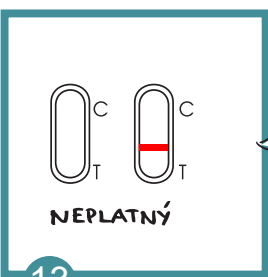

Ukazuje to něco jiného? Test je neplatný, musíš se otestovat znovu



Výsledek se zaznamená



Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce



Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdete domů



Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně

